

Elcam Stopcocks

Marvelous™ Stopcock (MRVLS)

点滴投与および圧力モニタリング用に特別に設計された独自の流路制御機能を備えた、スワッピング可能な閉鎖式ストップコック。Marvelous™は、システムを外気にさらすことなく、最小限の手作業で、ベストプラクティスに最大限遵守しながら、薬品と血液を継続的に洗浄することができます。


ElcamのMarvelous™は、E-Safe™製品の一部であり、ストップコックの汚染を最小限に抑え、患者様の安全性を高める様々なソリューションを提供するために特別に開発されました。



Elcam MedicalのMarvelous™
ストップコック - モニタリングと点滴
処置の両方に最適です。



患者モニタリング

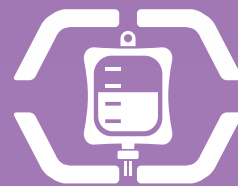

薬剤投与

Marvelous™は、点滴処置とモニタリングの両方の用途に多くの利点をもたらします。:

安全性

- ・細菌と空気の侵入を低減 - 常に閉鎖されたシステムを維持
- ・デッドスペースの減少 - 残留量を最小限に抑え確実に洗浄します。薬剤や血液に関係なく、内部はインラインフローによって常に洗浄され、血液凝固や細菌定着を防ぎます。

効率的な圧力モニタリング

- ・クローズドシステムでのプライミングが可能
- ・シグナルが減衰せず圧力モニタリングを保証

血液サンプリングの促進

- ・クローズドシステムの利点を生かした血液サンプリングと、最小限の残留容量でのオンライン洗浄が可能。



使いやすさ

- ・時間とコストを節約 - カニューレ、針、キャップは必要ありません。
- ・洗浄時間の短縮 - 常時インライン洗浄が可能
- ・ユニバーサル - Marvelousのポートは、一般的に使用されているすべてのルアーと互換性があります。

プロパティ	単位	モニタリングに最適1 (標準フロー)	IV用マーベラス1 (高流量)
「全開」位置での流量 ² レート	[ml/分]	140±5	200±5
サイドポートを閉じた状態での流量 ² レート	[ml/分]	70±5	105±5
サイドポートからオス・ルアーへの流量 ² レート	[ml/分]	135±5	175±5
サイドポート容積	[ml]	0.2±0.02	0.2±0.02

¹ 許容可能な品質レベルについては、仕様番号0022-Gを参照

² 流量は75mmHgの圧力/1mの水圧下で測定された

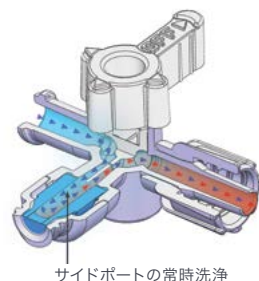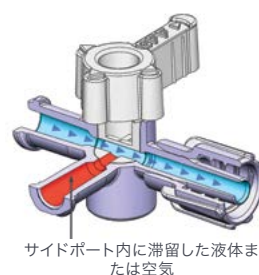

物理的特性

- 脂質耐性
- ラテックス不使用
- 非溶血性

オプション

- 1バルブまたは2バルブ
- ハンドル: 1アームまたは3アーム
- 異なるハンドルカラー
- 大流量または標準流量
- ルアーロックの有無
- マニホールド

Marvelous™は、非滅菌製品のCE承認および510(k)認可を受けています。



www.elcam-medical.com

Head Office / Manufacturer
Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120/1
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA
Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe
Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China
Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com